

适用产品	密级
和普乐无创呼吸机	秘密
文件版本	共 6 页
A/0	

## 和普乐数据分析软件 安装说明

## 目录

1	运行要求.....	1
2	解压软件安装包.....	1
3	安装异常情况处理.....	1
3.1	系统缺少.net framework 4.0 以上环境.....	1
3.2	系统缺少 Microsoft Visual C++2010 运行库.....	3
4	安装 PDF 阅读器 .....	3

## 1 运行要求

- 1、 电脑硬件要求：奔腾双核以上处理器，2G 及以上内存，1G 及以上硬盘空间；
- 2、 软件系统要求：windows XP/win7/win8/win10。

## 2 解压软件安装包

- 1、 解压软件安装包，安装包内容如图 1 所示：

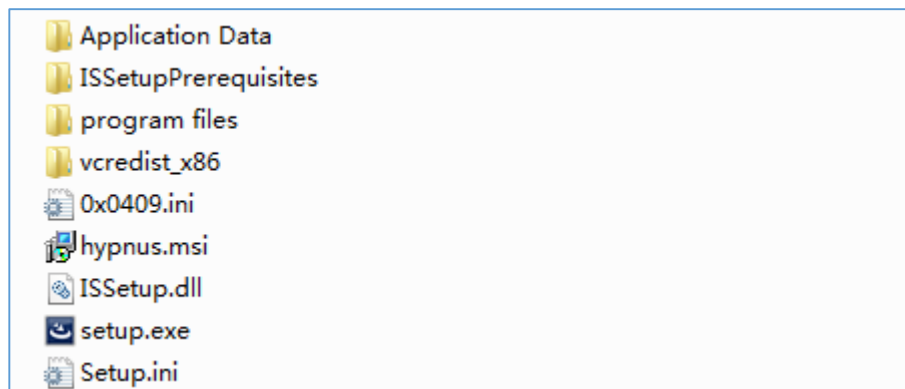


图 1

对于 1.2 及以前的版本，建议将旧版本软件卸载，卸载后，使用上图中的 setup.exe 进行安装；  
对于 1.3 以后的版本，可直接使用 setup.exe 对旧版程序进行升级。

注意：当电脑没有安装 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 时，强烈建议点击安装 vcredist\_x86 文件夹下 vcredist\_x86.exe 程序，否则软件可能出现异常。

## 3 安装异常情况处理

### 3.1 系统缺少.net framework 4.0 以上环境

- 1) 如果系统中无.net framework 环境，在程序安装过程中会弹出如图 2 所示提示：

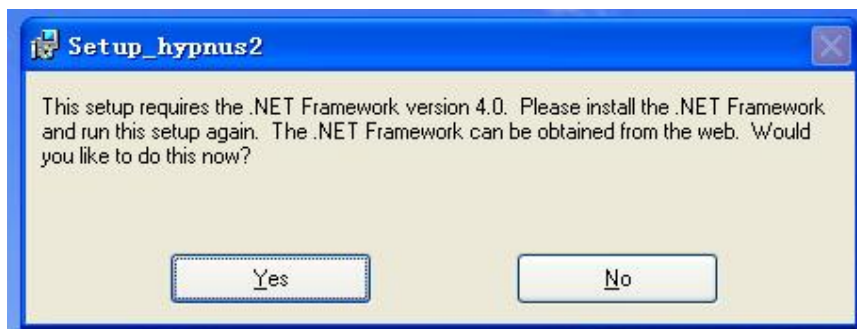


图 2

点击 yes 开始安装.net framework 4.0，具体安装过程如图 3、图 4 和图 5 所示。



图 3

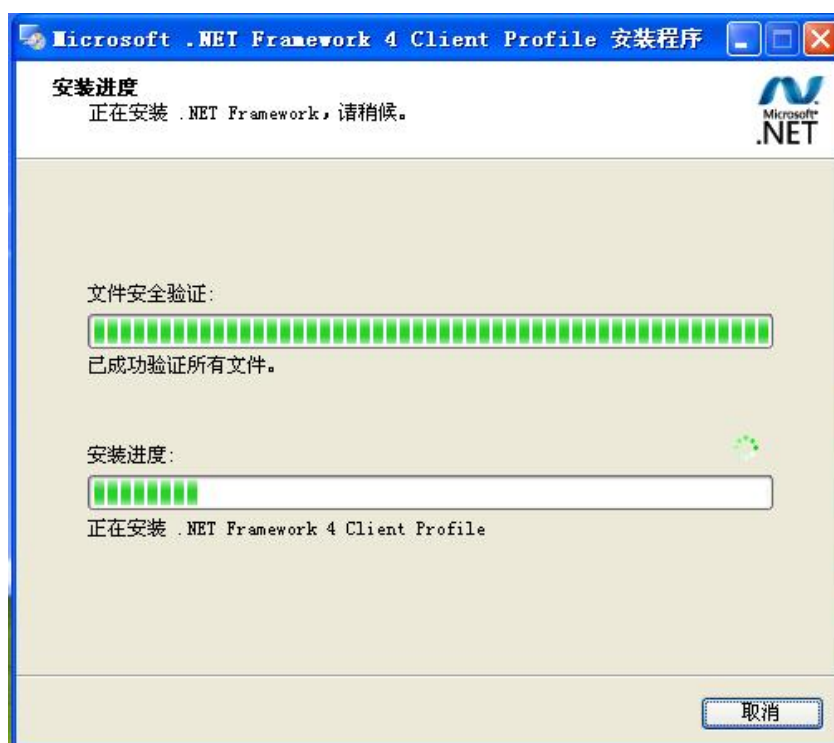


图 4



图 5

### 3.2 系统缺少 Microsoft Visual C++2010 运行库

软件安装过程中，会因系统缺少 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 运行库而导致错误，会弹出图 6 所示的错误提示框：



图 6

此时请安装 vcredist\_x86.exe，该安装文件如图 7 所示：


 vcredist_x86.exe	2010/3/19 9:40	应用程序	4,955 KB
--	----------------	------	----------

图 7

## 4 安装 PDF 阅读器

程序生成报告时，如果系统没有安装 PDF 阅读相关工具，会提示安装 PDF 阅读器，提示框如

图 8 所示:



图 8

请自行下载并安装 PDF 阅读器，否则会影响数据分析软件生成报告的读取。